


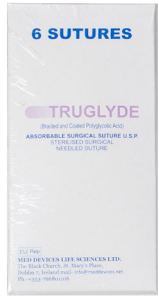

THD SLIDE ONE KIT

THD NÄHTE	THD SLIDE	THD DOPPLERSONDE
		

Gebrauch

THD Slide wurde speziell zur unmittelbaren Anwendung mit dem THD Evolution/THD Revolution Doppler entwickelt.

Allgemeine Beschreibung

THD Slide ist ein Anoskop/Proktoskop, das speziell zur besseren Anwendung des THD-Verfahrens bei der Behandlung von Hämorrhoidalleiden auch mit höherem Schweregrad entwickelt wurde. Dank der besonderen Form des Anoskops/Proktoskops THD Slide mit einem ausziehbaren Schlitten kann die Ligatur und Auflösung des Prolapses mit einem einzigen Instrument durchgeführt werden, wodurch der Patient weniger belastet und der Eingriff beschleunigt wird. Das Anoskop/Proktoskop THD Slide besteht aus einem transparenten medizintauglichen Kunststoff, der zusammen mit einem speziell geformten Glasfaserlichtfinger eine perfekte Ausleuchtung des Operationsfeldes ermöglicht. Das spezifische Anoskop/Proktoskop THD Slide wurde eigens entwickelt, um den Analkanal während des Eingriffs richtig zu spannen, es ist auch mit einer speziellen Führung für den THD-Nadelhalter ausgestattet. Die mitgelieferte Dopplersonde wird in das Anoskop/Proktoskop eingeführt und ist in direktem Kontakt mit der Schleimhaut zur genauen Identifizierung der Hämorrhoidenarterien. Die Box enthält 10 in sterilen Blistern verpackte Einweg-Dopplersonden zur unmittelbaren Anwendung, 10 Packungen Ligaturfäden mit je 6 Fäden und 10 hämostatische Analtampons Scrofalon Anal.



Abmessungen	
THD SLIDE	
Innenabmessung	27x19 mm
Außenabmessung	33x23 mm
Arbeitslänge	100 mm
Arbeitsfenster (variabel)	Min. 30x10 mm
Gesamtlänge	172 mm
Länge Griff	105 mm

THD Slide			
Artikelnr.	Anz.	Beschreibung	Risikoklasse
800065-10	10	THD Slide One Kit	
<i>inklusive</i> 710004	10	THD Slide (steril) - 1 Protoskop mit Schlitten, 1 Einmal-Knotenschieber, 1 Einmal-Nadelhalter	IIa
<i>inklusive</i> 800063	10	Einweg-Dopplersonde (steril)	IIa
<i>inklusive</i> 880000	10	Packung Fäden (je 6 Fäden - steril)	III
<i>inklusive</i> 800050	10	Scrofalon Anal (steril)	III

THD Slide (steril)		
Artikelnr.	Anz.	Beschreibung
800065-1	1	THD SLIDE ONE KIT
800065-5	5	THD SLIDE ONE KIT
800065-10	10	THD SLIDE ONE KIT

Zubehörprodukte		
Artikelnr.	Anz.	Beschreibung
800133	1	THD REVOLUTION
800000	1	THD EVOLUTION